

Die Juvéderm® ULTRA
Produktpalette

hat sich bewährt



Juvéderm® VOLUMA®

Zur Juvéderm®-Produkt-
palette gehört auch
Juvéderm® VOLUMA®, das
speziell dazu entwickelt
wurde, verlorengegangenes
Volumen im Wangen- und
Kinnbereich wiederherzu-
stellen und die Gesichtsform
zu verbessern.

Die Fakten

Wie verläuft die Behandlung?

Eine Behandlung mit Juvéderm® ULTRA kann nur 15 Minuten aber auch länger dauern – je nachdem, welche Gesichtsbereiche behandelt werden.

Ihr behandelnder Arzt injiziert den Dermalfiller unter die Haut – bei feinen Linien knapp unter die Oberfläche, bei ausgeprägteren Falten etwas tiefer.

Ist die Behandlung unangenehm?

Juvéderm® ULTRA ist ein geschmeidiges Gel, das sich einfach und gleichmäßig injizieren lässt; es enthält zudem Lidocain, um Unannehmlichkeiten während der Behandlung zu reduzieren.

Wie lange hält die Wirkung an?

Die Wirkdauer hängt vom Alter, von der injizierten Menge, vom Behandlungsbereich und der Hautqualität sowie vom allgemeinen Gesundheitszustand und Lebensstil des Patienten ab. Juvéderm® ULTRA-Produkte wirken jedoch erwartungsgemäß bis zu einem Jahr nach der Behandlung.


Gibt es Nebenwirkungen?

Ihr behandelnder Arzt wird Sie über mögliche Nebenwirkungen informieren – sie sind zumeist mild bis moderat und klingen innerhalb weniger Tage ab. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation, die jeder Packung beiliegt.

Literatur:

1. Pinsky *et al.* Juvéderm® Injectable Gel: A Multicenter, Double-Blind, Randomized Study of Safety and Effectiveness. *Aesthetic Surg J* 2008;28:17-23

Stempel der Klinik

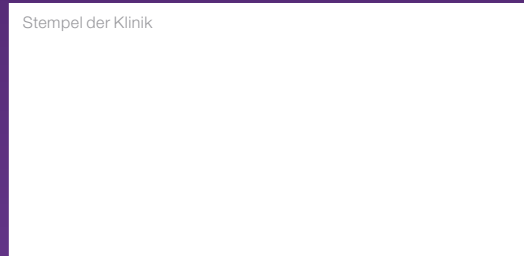

 ALLERGAN

Pharm-Allergan GmbH * Pforzheimer Str. 160 * 76275 Ettlingen
www.juvedermultra.de

DE/0443/2010 - Oktober 2010



Gutes
Aussehen
stärkt Ihr
Selbstbewusstsein

Juvéderm®
ULTRA

Wagen Sie den ersten Schritt zu mehr Selbstbewusstsein

Die Zeit vergeht

Viele Menschen fühlen sich besser, je jünger sie aussehen. Der Alterungsprozess lässt sich jedoch nicht aufhalten – mit Ihrem Körper wird auch Ihre Haut älter, und in der Folge ändert sich das Erscheinungsbild und die Eigenschaften der Haut.



Sie erwarten Resultate



Vorher



Nachher



Diese Therapie-Ergebnisse können Sie mit der Juvéderm® ULTRA-Produktpalette erzielen.:

Feine Linien werden korrigiert

Nasolabialfalten werden sichtbar gemildert

Tiefe Falten werden reduziert

Die Lippen sind klarer definiert und voller

Die Vorher/Nachher-Bilder wurden von Freedomhealth, London, zur Verfügung gestellt.

Sie erwarten Qualität

Es ist klinisch erwiesen, dass die Juvéderm® ULTRA-Produktpalette Gesichtslinien und Falten reduziert. Wenn Sie also einen großen Teil Ihres Selbstbewusstseins Ihrem Lächeln verdanken, können Sie dank Juvéderm® ULTRA Falten an den Mundwinkeln korrigieren und eine Redefinition der Lippen erzielen.

Juvéderm® ULTRA*

Behandeln Sie feine, oberflächlich gelegene Falten, vor allem im Bereich der Augenwinkel.

Korrigieren Sie mittelstark ausgeprägte und tiefe Falten, wie z.B. Lachfalten zwischen Nase und Mundwinkeln.

Bringen Sie dank klar definierter Lippen und beseitigter Vertiefungen in den Mundwinkeln Ihr Selbstvertrauen stärker zum Ausdruck.

Verbessern Sie Ihre Gesichtskonturen und korrigieren Sie die sichtbarsten Falten.



Alter, hormonelle Veränderungen, Sonnenlicht und Rauchen können zur Bildung feiner Linien und Falten beitragen und Ihre Haut empfindlicher und weniger elastisch machen.


Mit fortschreitendem Alter verringert sich der Hyaluronsäure (HA)-Gehalt unserer Haut, der für die Wasserretention entscheidend ist. Die Aktivität unserer ölproduzierenden Talgdrüsen lässt nach und die Haut wird trockener. Zudem verliert die Haut mit der Zeit an Fett, wodurch sie weniger füllig und glatt aussieht. Da außerdem die Zahl der Blutgefäße abnimmt, verliert die Haut auch ihre jugendliche Farbe und Erscheinung.

Zusätzlich zu all diesen Veränderungen und dem Stress und den Belastungen, denen wir im Alltag ausgesetzt sind, ist auch die Schwerkraft am Werk: Sie zieht unsere Haut nach unten und macht sie schlaffer.

Eine männliche Perspektive

Die Haut eines erwachsenen Mannes ist normalerweise dicker als die einer Frau. Zudem ist Männerhaut durch die Rasur ständiger Belastung ausgesetzt. Solche Faktoren müssen bei der Behandlung der Anzeichen männlicher Alterung berücksichtigt werden.

* Die Juvéderm® ULTRA-Produktpalette umfasst Juvéderm® ULTRA 2, 3, 4 und Juvéderm® ULTRA SMILE.

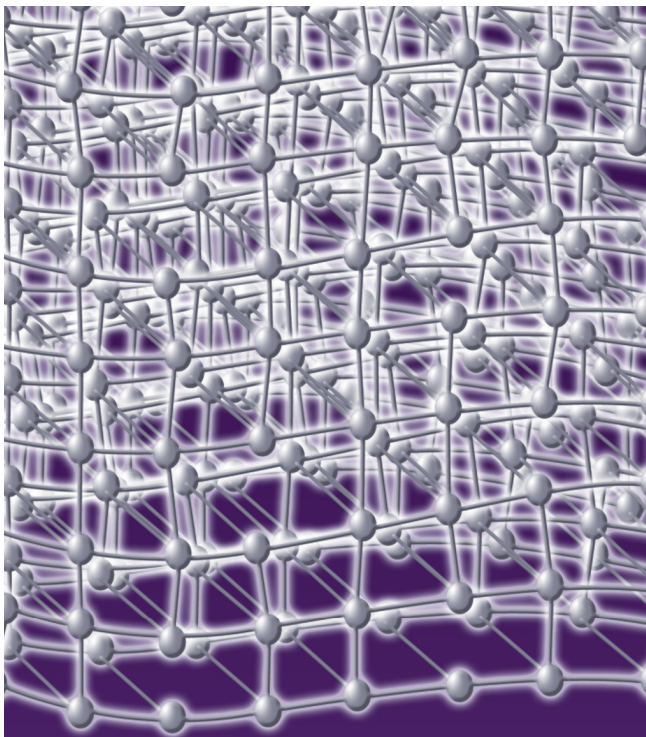


Welche Möglichkeiten stehen Ihnen offen?

Die Juvéderm® ULTRA-Produkte sind sehr beliebt für die Behandlung von Linien und Falten, denn sie tragen dazu bei, dass die Anzeichen der Hautalterung gemildert werden. Die Behandlung ist schnell und bequem, und die Resultate sind sofort sichtbar.


Die Juvéderm® ULTRA-Produktpalette stützt sich auf ein Gel mit glatter Konsistenz – ein modernes Gel mit einer 3D-Matrix-Rezeptur, das ausreichend robust ist, um langanhaltende Resultate zu gewährleisten. Je nachdem, welchen Gesichtsbereich Sie behandeln, kann die Wirkung bis zu einem Jahr anhalten.¹

Alle Produkte der Juvéderm® ULTRA-Produktlinie verteilen sich gut in der Haut.


Im Gegensatz zu einigen anderen Dermalfillern haben Produkte der Juvéderm® ULTRA-Palette keine körnige Konsistenz, was bedeutet, dass sie sich einfach injizieren lassen, sich gut verteilen und ein geschmeidiges und natürliches Ergebnis liefern. Der Zusatz von Lidocain in der Juvéderm® ULTRA-Produktpalette erhöht zudem den Komfort während und nach der Behandlung.

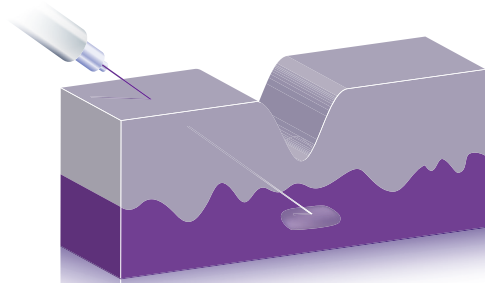

Juvéderm® ULTRA wird mit einer feinen Nadel unter die Hautfalte injiziert.

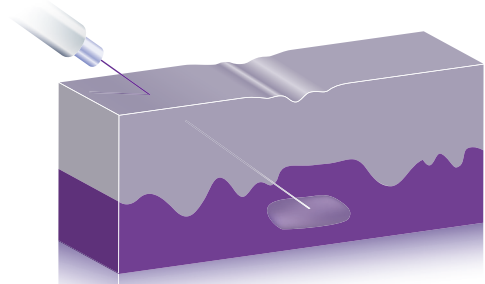

Feine Linien und tiefere Falten werden sofort reduziert

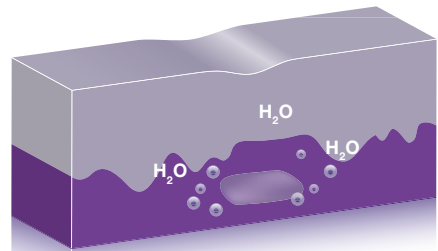

Die Hyaluronsäure in Juvéderm® ULTRA zieht Wasser an und bindet die Feuchtigkeit, wodurch sie zu einer Wirkdauer von bis zu einem Jahr beiträgt